



HEALTH CARE EQUIPMENT

EKINET - Gazes de limpeza, coadjuvantes para a higiene e limpeza diária da zona do contorno dos olhos mesmo em sujeitos particularmente sensíveis.



Ekinet 20 Sachês Descartáveis de 2,5ml

Gazes de limpeza Ekinet para higiene periocular

Gazes de limpeza estéreis Ekinet, coadjuvantes para a higiene e limpeza diária da zona do contorno dos olhos mesmo em sujeitos particularmente sensíveis.

CONTÉM: Clorexidina, Ácido Hialurônico, Sal de Sódio, Prata Coloidal e Extrato de Capuchinha

MODO DE USAR: Após a limpeza das mãos, abra o sachê, retire a gaze e aplique topicamente na área ao redor dos olhos, passando suavemente para permitir a limpeza adequada e remoção de secreções e/ou eventuais depósitos oculares.

QUANDO USAR: Adjuvante em caso de limpeza de secreções lipídicas ou resíduos secos e descamativos; elimina quaisquer vestígios de cosméticos; limpa manchas da pele que afetam a região das pálpebras; reduz o risco de infecções presentes nas pálpebras e cílios antes e depois da cirurgia oftalmológica; indicado para uso diário na remoção de irritantes e calmante e reidratação da pele ao redor dos olhos.

ADVERTÊNCIAS: Armazenar em local fresco e seco, longe de fontes de luz e calor.

VELAS LARGAS, HEALTH CARE EQUIPMENT

Rua Dr. António Martins, Número 44, 2º Esq, Benfica, Lisboa, na freguesia de São Domingos de Benfica, Portugal

Email: info@velaslargas.com

Website: www.velaslargas.com